


# サーモフォーカスプロの正しい使い方をご理解いただくために、必ず「取扱説明書」をお読み下さい。

以下は、サーモフォーカスプロをすぐにお使いいただくためのクイックガイドです。

1. 裏側のカバーを開け、電池を入れる。

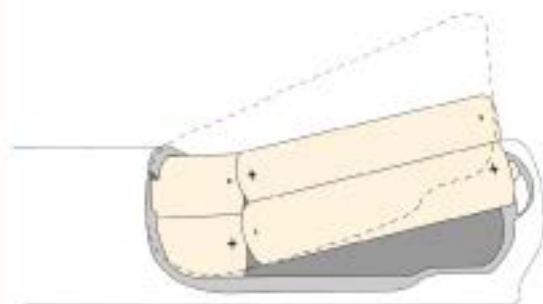

2. 本体がスタンバイ状態<sup>1</sup>になるまで待つ。



<sup>1</sup>液晶モードが「オン」の時には室温が表示された状態、「オフ」の時には消えた状態

3. 「フェースボタン」を押し電源を入れる。<sup>2</sup>




<sup>2</sup>この段階でライトが点滅した場合は、本体がスタンバイ状態(上記2.)になっていることを確認して下さい。

4. キャップを開け




5. フェースボタンを押しながら額に近づける。2つの赤い光線が1点になったらボタンから指を離す。

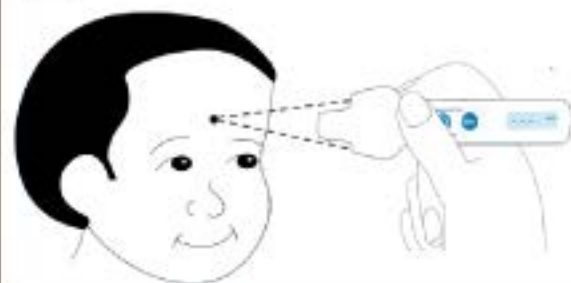

6. 液晶画面に体温が表示される。



額で測定した時にLo.3が表示される場合は、以下の部位で測定を行って下さい。

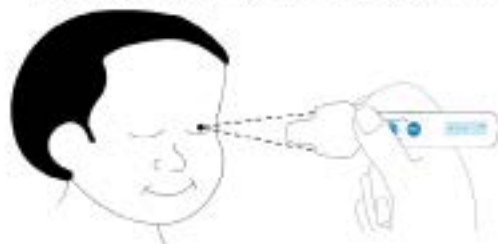

1. 閉じた眼



2. 耳から2~3cm下の首の表面

注) 温度が違う部屋に本体を移動した時や、本体自体の温度が16℃以下の時には、裏面の指示に従い、MQCS (迅速校正機能) を行って下さい。

# MQCS (迅速校正機能) の使い方

安定化するまで待たずに直ちに使用したい場合や、本体自体の温度が16℃以下の時には、MQCSを行って下さい。  
MQCSを行う前に、本体がスタンバイ状態(オモテ面2.)になっていることを確認して下さい。

1. 「ホームボタン」を押し電源を入れる。<sup>1</sup>



1.の段階でライトが点滅した場合は、本体がスタンバイ状態(オモテ面2.)になっていることを確認して下さい。


2. 校正を行うために「フェイスボタン」と「ホームボタン」を同時に押す。すると「CAL」の文字が液晶画面に表示される。




3. 10秒以内にキャップを開け、室内の壁、または机などの板面に向かって「ホームボタン」を押す。




4. 焦点が合ったらボタンから指を離す。光がゆっくり点滅した後、液晶画面に室温が表示される。

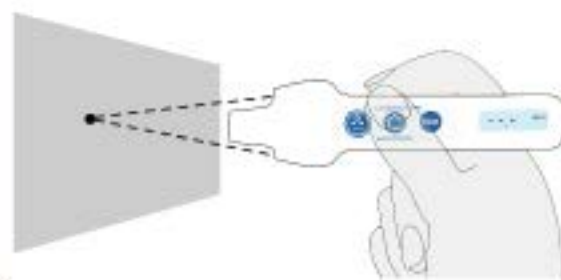

5. 次にフェイスボタンを押しながら額に近づける。2つの赤い光線が1点になったらボタンから指を離す。

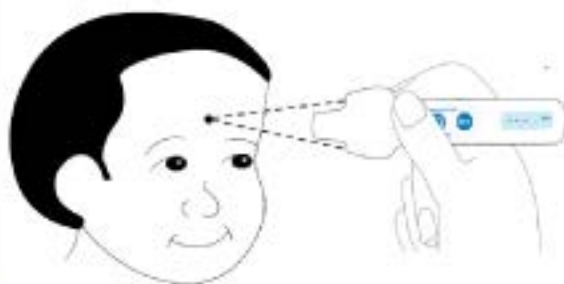

6. 液晶画面に体温が表示される。

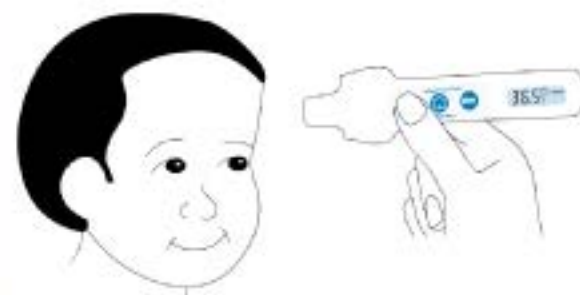

## 注意

A. 適正に使用するために、また、正確な計測を行うために、必ず正しい持ち方でご使用下さい。



B. 本体を落としたり、本体に衝撃を与えたりしないよう注意して下さい。体温計内部の部品に障害を与え、校正に影響を与える原因となります。

